

FICHA TECNICA

JERINGAS DESECHABLES ESTERILES CON CONO CIEGO SIN AGUJA



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Jeringas estériles de colores para un solo uso de 5ml y 10ml sin aguja con cono ciego o tapón de seguridad.

Marca: **MaLu**

Presentación: Bolsa estéril X 50 Unidades.

Registro Sanitario: INVIMA 2022DM-0025296

Importador Y Acondicionador: Soluciones Vitales en Salud S.A.S

Fabricante: Ningbo Pinmed Instruments Co., Ltd.

Tipo de Dispositivo: Invasivo

Riesgo: IIA

Referencia: DM-015- BL

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Uso: dispositivo medico utilizado para envasar formulas farmacéuticas, magistrales y nutrición parenteral en el proceso de individualización de los tratamientos de los pacientes hospitalarios.

Vida Útil: 5 años bajo condiciones de almacenamiento optimas

Composición Cualitativa: PP, PE, Caucho Natural, Acero Inoxidable

Método de Esterilización: Óxido de etileno (EO)

CONVENCION DE COLORES



FICHA TECNICA

JERINGAS DESECHABLES ESTERILES CON CONO CIEGO SIN AGUJA



BENEFICIOS DE LA CONVENCION DE COLORES

Ajuste y adecuación de medicamentos y fórmulas magistrales según grupo terapéutico a través de códigos de colores para: medicamentos intravenosos, nutrición parenteral, antibióticos, anestésicos, inotrópicos, vacunas, tratamientos de quimioterapia entre otros.

VENTAJA COMPETITIVA

La incorporación del código de colores en las jeringas desechables en las centrales de mezcla, proporciona seguridad calidad y atención al paciente y trae consigo beneficios como:

- La oportunidad de brindar desde el punto de vista investigación mezclas de saberes farmacéuticos y alimentarios con la personalización de los grupos terapéuticos.
- Contribuir al bienestar en las Clínicas y Hospitales del personal médico y los pacientes a los cual se presta el servicio de preparación de los medicamentos.
- Cumplir con requisitos de habilitación.
- Innovación tecnológica.
- Disminuye errores en la elaboración de los medicamentos. (fácil comprobación de dosis y grupo terapéutico).
- Alta adherencia del personal a los protocolos de rotulación de medicamentos y formulas parenterales.
- Simplifica accidentes en el proceso de manipulación de los residuos con condiciones de peligrosidad.
- Disminución de costos por pago de residuos de agujas, compra por separado y esterilización de tapones y desperdicio y volumen de los empaques individuales de las jeringas.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

1. Temperatura máxima: 30C°
2. Humedad relativa permitida: máximo 70%
3. No almacenar bajo la luz solar directa
4. El área debe estar adecuadamente espaciada para permitir la limpieza e inspección.
5. Todas las superficies y estantes deben estar hechos y cubiertos con un material impermeable para permitir una limpieza adecuada y segura.
6. El área debe estar adecuadamente iluminada y ventilada para que el manejo se realice de manera correcta y segura

FICHA TECNICA

JERINGAS DESECHABLES ESTERILES CON CONO CIEGO SIN AGUJA



INTRUCCIONES DE USO

1. Abra el paquete y retire las jeringas y los conos ciegos.
2. Re envase el medicamento, fórmula magistral o nutrición parenteral que esté trabajando en el momento.
3. Envase por grupo farmacéutico y color determinado. No mezcle los colores de jeringas.
4. Adapte el tapón de seguridad para evitar derrames del medicamento.
5. Almacene las jeringas por color y grupo terapéutico.
6. Distribuya al servicio que lo requiera.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

1. Dispositivo de un solo uso.
2. Descartar después de usar.
3. Mantener las condiciones de almacenamiento.
4. No utilizar el producto si el empaque se encuentra dañado o en mal estado.