

FICHA TÉCNICA

JERINGAS DE COLORES DESECHABLES ESTÉRILES CON AGUJA



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Jeringas estériles de colores para un solo uso de 5ml y 10ml con aguja 21G (0.8x38mm) x 1½''

Marca: **MaLu**

Presentación: Caja X 100 Unidades Individuales y por color

Registro Sanitario: INVIMA 2022DM-0025296

Importador Y Acondicionador: Soluciones Vitales en Salud S.A.S

Fabricante: Ningbo Pinmed Instruments Co., Ltd.

Tipo de Dispositivo: Invasivo

Riesgo: IIA

Referencia: DM-016- CJ

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Uso: administración e inyección de fármacos en la piel, por vía subcutánea, intramuscular e intravenosa.

Vida Útil: 5 años bajo condiciones de almacenamiento optimas

Composición Cualitativa: PP, PE, Caucho Natural, Acero Inoxidable

Método de Esterilización: Óxido de etileno (EO)

CONVENCIÓN DE COLORES



FICHA TÉCNICA

JERINGAS DE COLORES DESECHABLES ESTÉRILES CON AGUJA



GRUPO TERAPEUTICO	EJEMPLOS	COLOR
Inductores anestésicos	Tiopental, Propofol, Ketamina	Amarillo
Relajantes neuromusculares no despolarizantes	Vecuronio, Atracurio	Rojo
Antagonistas de relajantes neuromusculares no despolarizantes	Neostigmina, Sugamadex	
Relajantes neuromusculares despolarizantes	Succinilcolina	
Opioides	Morfina, Fentanilo	Azul
Antagonistas de opioides	Naloxona	
Anticolinérgicos	Atropina	Verde
Miscelánea	Oxitocina, Antibióticos, Heparina	Blanco
Nutriciones Parenterales		Violeta

VENTAJA COMPETITIVA

La incorporación del código de colores en las jeringas desechables como medida para el uso seguro de medicamentos en anestesia y centrales de mezcla, trae consigo beneficios como:

- Disminuye errores por parte del personal de la salud en la administración de los medicamentos.
- Alta adherencia del personal de la salud a los protocolos de rotulación de medicamentos.
- Rápido reconocimiento de los medicamentos preparados y requeridos en situaciones críticas o de emergencia gracias a la convención de colores definida a nivel mundial por la OMS para los servicios de anestesia.
- Erradica accidentes en el proceso de manipulación de los residuos.
- Agilidad en la elaboración, dispensación y aprovechamiento del fármaco.
- Innovación tecnológica.
- Cumplir con requisitos de habilitación.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

1. Temperatura máxima: 30C°
2. Humedad relativa permitida: máximo 70%
3. No almacenar bajo la luz solar directa

FICHA TÉCNICA

JERINGAS DE COLORES DESECHABLES ESTÉRILES CON AGUJA



4. El área debe estar adecuadamente espaciada para permitir la limpieza e inspección.
5. Todas las superficies y estantes deben estar hechos y cubiertos con un material impermeable para permitir una limpieza adecuada y segura.
6. El área debe estar adecuadamente iluminada y ventilada para que el manejo se realice de manera correcta y segura

INSTRUCCIONES DE USO

1. Verifique que el paquete de la jeringa no esté dañado y sin abrir. Deséchalo si está dañado o abierto.
2. Abra el paquete y retire la jeringa.
3. Limpie la parte superior del vial con alcohol y deje que se ventile.
4. Retire el protector de la aguja. No mueva el émbolo y no intente inyectar aire en el vial, ya que desactivará la jeringa.
5. Tome el vial e inviértalo. Inserte la aguja en el vial.
6. Mantenga la punta de la aguja en el líquido en todo momento. Tire lentamente del émbolo hacia atrás para llenar la jeringa. El émbolo se detendrá automáticamente justo después de la marca de dosis.
7. Para eliminar las burbujas de aire, retire la aguja del vial, sosteniendo la jeringa en posición vertical; golpee el cilindro para que las burbujas se dirijan a la punta de la jeringa.
8. Tire del émbolo hacia atrás para permitir la entrada de aire a través de la aguja hasta que entre en contacto con la burbuja en el cilindro de la jeringa.
9. A continuación, empuje con cuidado el émbolo hasta la marca de dosis, expulsando así la burbuja de aire.
10. Administre el medicamento de acuerdo con los protocolos establecidos.
11. Presione el émbolo completamente para administrar la dosis.
12. Coloque la jeringa usada inmediatamente en un recipiente desechable de agujas.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

1. Dispositivo de un solo uso.
2. Descartar después de usar.
3. Mantener las condiciones de almacenamiento.
4. No utilizar el producto si el empaque se encuentra dañado o en mal estado.